

Sehr geehrter Kunde,

wir hoffen, dass die hier vorgelegte Lupenbrille Sie nachhaltig bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Beachten Sie dazu bitte die nachfolgenden Hinweise!

### Achtung:

**Nichtbeachtung dieser Anweisung kann einen Verlust der Produktgarantie zur Folge haben!**



Customer Service  
0821-8949420



#### NICHT VERWENDEN:

**X** Lysol® oder Reiniger, die Alkohol, Ethanol, Ammoniak oder Jod enthalten

#### NICHT DURCHFÜHREN:

**X** Autoklavieren, in Flüssigkeit eintauchen

#### ZUR REINIGUNG:

**✓** Verwenden Sie milde Seifenlösung und Wasser mit einem weichen Tuch, um Partikel zu lösen. Trockenwischen oder lufttrocknen

#### ZUR DESINFEKTION:

**✓** Verwenden Sie SciCan OPTIM 33TB/ Optim1 Wischtücher oder Lösung. Optim1 kann über die CTM GmbH bezogen werden

**Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung!**

**Bitte bewerten Sie Ihre Lupenbrille: (nach „Schulnoten“; 1= sehr gut...5 = mangelhaft)**

	1	2	3	4	5
Genauigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Größe des Sehfeldes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausnutzung Tiefenschärfe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gewicht/ Tragekomfort	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Neigungswinkel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ihre Vergrößerung

Optik

eingebaut (TTL)

klappbar (FLM)

**unsere  
Kontakt-Daten**

CTM GmbH  
Sedelfeldberg 10 a  
D-86316 Friedberg

**FON** +49(0) 821/78 49420  
**FAX** +49(0) 821/78 49421  
**MAIL** info@ctm-gmbh.com  
**WEB** www.ctm-gmbh.com

Ihr Name (oder ohne)

Ihr Fachgebiet