


Kurz-Gebrauchsanweisung Daymark Kopflicht

ERSETZT NICHT DAS LESEN DER GEBRAUCHSANWEISUNG!

Bedienungselemente des Kopflichtes

- 1 Kopfring mit Einstellknöpfen für Weite und Höhe
- 2 Hinterkopf-Polster
- 3 Leuchtmodul
- 4 Irisblende
- 5 Lüftungsschlitze
- 6 Ladeschale

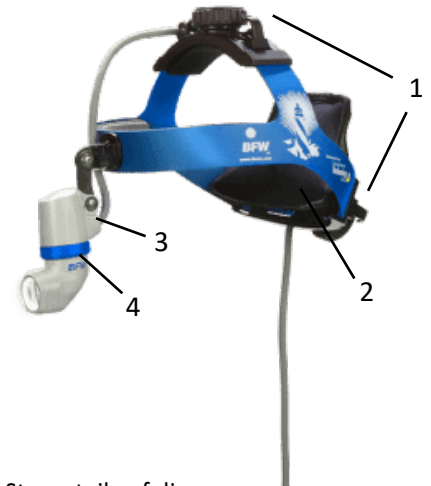

Laden der Akkus

Beim Einsatz der Akkus in die Ladestation und in Position der Kontakte achten.

Es sind zwei Versionen des Akkus verfügbar:

Ladezustand des Akkus wird permanent per LCD angezeigt (5 „Blocks“)

Ladezustand des Akkus wird nach Drücken des Knopfes auf einem LED-Bar angezeigt (4 LEDs)

das Steuerteil auf die



Anschluß des Leuchtmodules an das Steuerteil

Zum Verbinden des Steckers in der markierten Position (Pfeil gegen Nut) einrasten oder solange auf dem Sockel drehen, bis der Stecker einrastet.

Zum Lösen den blauen Ring des Konnektors im Uhrzeigersinn drehen und Konnektor abziehen




Bedienung des Steuerteils:

- Auf beiden Seiten des Steuerteiles (Pfeile) befinden sich Taster
- 1 Taster drücken : Kopflicht schaltet ein und ist auf höchster Stufe
- 1 Taster erneut drücken: Intensitätsstufen (5) werden durchgeschaltet
- 1 Taster (anhaltend) drücken (> 2 sec): Kopflicht schaltet ab.

Akku von hinten aus der Halterung drücken, wenn dieser wieder aufgeladen werden soll.
Nicht an der Lasche herausziehen!

Vollgeladen ca. 6 h Kapazität bei voller Leuchtstärke.

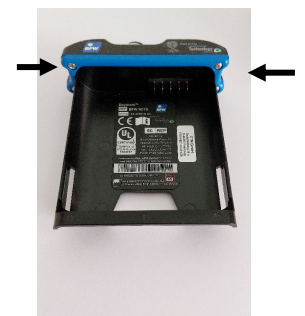

Handhabung des Akkus: Ruhephase:

- NICHT nach längerem Betrieb direkt den Akku aufladen
- NICHT nach längerem Aufladen direkt in den Betrieb gehen (voll geladener Akku ist ok)

Wartezeit von ca. 10 Minuten einhalten für optimale Lebensdauer der Akkus!