


Kurz-Gebrauchsanweisung Dover / Bristol NC Kopflicht

ERSETZT NICHT DAS LESEN DER GEBRAUCHSANWEISUNG!

Bedienungselemente des Kopflichtes

- 1 Kopfring mit Einstellknöpfen für Weite und Höhe
- 2 Hinterkopf-Polster
- 3 Leuchtmodul Dover NC
- 4 Leuchtmodul mit Iris (Bristol NC)
- 5 Steuerteil mit Ein/ Aus/ Intensitätsregler
- 6 Ladestation für zwei Akkus

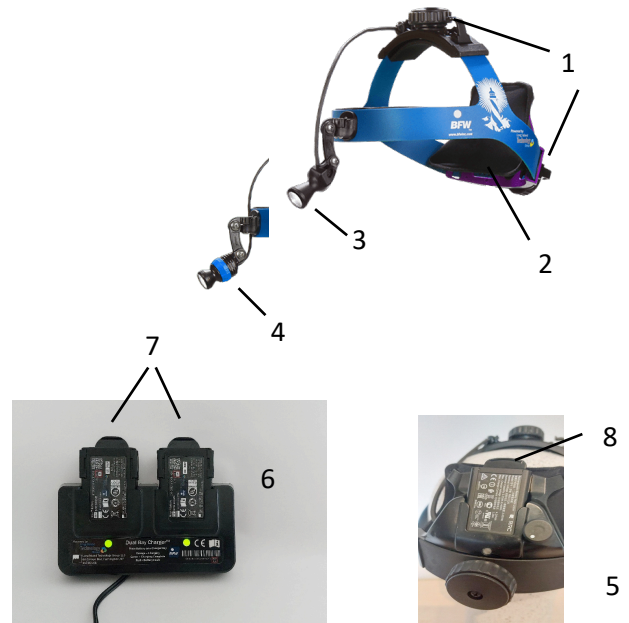

Laden der Akkus

Die Akkus werden so eingesetzt, dass die Beschriftung sichtbar ist (auf Verriegelung achten). Ohne Akkus und bei Netzanschluss zeigt die Ladestation zwei rote LEDs, beim Ladevorgang gelbe LEDs, bei kompletter Ladung grüne LEDs. Beim Entnehmen der Akkus Verriegelung (7) leicht zurückbiegen.

Bedienung des Steuerteils:

Akku in die Halterung des Steuerteiles einstecken; auf Verriegelung (8) achten. Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn schaltet das Kopflicht ein, für etwa 10 Sekunden ist eine grüne Kontroll-LED zu sehen, die dann abschaltet.

Bei geringer Ladung erscheint am Steuerteil eine rot-blinkende LED, bei vollständiger Entladung eine permanent leuchtende rote LED und dazu ein Piepton.

Bei Akkuwechsel die Verriegelung (8) leicht zurückbiegen.

Vollgeladen ca. 4 h Kapazität bei voller Leuchtstärke.

Handhabung des Akkus: Ruhephase:

NICHT nach längerem Betrieb direkt den Akku aufladen

NICHT nach längerem Aufladen direkt in den Betrieb gehen (voll geladener Akku ist ok)

Wartezeit von ca. 10 Minuten einhalten für optimale Lebensdauer der Akkus!