

Kurz-Gebrauchsanweisung Micro/ Mini Kopflicht

ERSETZT NICHT DAS LESEN DER GEBRAUCHSANWEISUNG!


Bedienungselemente des Kopflichtes

- 1 Leuchtmodul Micro
- 2 Leuchtmodul Mini
- 3 Steuerteil mit Akku und Halteclip
- 4 Ladegerät
- 5 Ladeanzeige
- 6 Ladebuchse



Laden der Akkus

Zum Laden des Steuerteiles / Akku wird das Ladekabel mit Buchse auf der Unterseite des Steuerteiles (6) verbunden. Die Nut des Ladekabels muss dabei in die Aussparung des Buchse geführt werden.

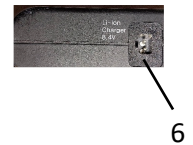

Die Kontrollleuchte am Ladegerät (5) ist während des Ladevorgangs rot, und schaltet bei vollständiger Ladung auf grün.

Konnektion der Kabel

Das Kabel des Leuchtmodules muss mit dem Zwischenkabel zum Steuergerät verbunden werden. Stecker und Buchse müssen ganz zusammengesteckt werden, damit eine sichere und flüssigkeitsdichte Verbindung gegeben ist. Auch der Konnektor zum Steuerteil muss ganz nach unten gedrückt werden und rastet hörbar ein.



Bedienung des Steuerteils:

Ein/ Ausschalten des Kopflichtes und Einstellung der Intensität über den Drehregler oben am Steuerteil (Pfeil). Zum Einschalten muss ein Widerstand überwunden werden, es ist ein Klickton hörbar.

Der Halteclip (7) am Steuerteil ist um 360° rotierbar. Mit ihm kann das Steuerteil z. B. an einer Kasaktasche fixiert werden. Zum Abnehmen des Clips muss die Entriegelung oben am Clip heruntergedrückt werden, dann kann der Clip nach unten weggeschoben werden. Aufschieben des Clips ist ohne Drücken der Entriegelung möglich.

Vollgeladen ca. 8 h Kapazität bei voller Leuchtstärke



Handhabung des Akkus: Ruhephase

- NICHT nach längerem Betrieb direkt den Akku aufladen
- NICHT nach längerem Aufladen direkt in den Betrieb gehen (voll geladener Akku ist ok)
- Wartezeit von ca. 10 Minuten einhalten für optimale Lebensdauer der Akkus!