

Nasenpads – Montagehinweise

Nasenpads für Titanrahmen

Sehr geehrter Kunde,

der Wechsel der Nasenpads an Ihrer Lupenbrille ist eine einfach durchzuführende Sache. Dennoch können einige Details den Wechsel erschweren bzw. in die Länge ziehen.

Sie haben die Wahl zwischen einem zweiteiligen Nasenpad und einem einteiligen Nasenpad (wird überwiegend verwendet).

Den neuen Nasenpad in der richtigen Ausrichtung bereitlegen (Kurvatur beachten).

Die Ösen des Nasenpads werden jeweils durch eine Schraube (A) in einer Mulde (B) gehalten, die sich beidseitig an den Nasenstegen des Brillengestells befindet.

Prüfen Sie, ob die Ösen der Nasenpads frei durchgängig sind. Dazu eignet sich z. B. eine Büroklammer. Schieben Sie diese durch die Öse, um den Durchgang zu prüfen.

Die Schrauben entfernen Sie bitte mit dem Schraubendreher, den Sie mit der Lupenbrille geliefert bekommen haben. Verwenden Sie zum Herausziehen der Schrauben eine kleine Pinzette. Setzen Sie bevorzugt die Schrauben wieder ein, die Sie herausgeschraubt haben.

Prüfen Sie, ob in den Mulden noch Teile der alten Silikonösen vorhanden sind; diese müssen entfernt werden.

Die kleinen Schrauben können aus der Pinzette verspringen und dann schwer auffindbar sein. Arbeiten Sie deshalb mittig über einer Tisch/ Arbeitsplatte und greifen Sie die Schrauben mit der Pinzette nur mit mäßigem Druck.

Brillengestell mit einer Hand festhalten, die jeweilige Öse in die Mulde drücken und mit einem Finger derselben Hand fixieren. Mit der anderen Hand die mit Pinzette gefasste Schraube durch die Bohrung der Öse stecken.

Die Schraube muss ungefähr senkrecht in der Mulde stecken. Dann die Schraube festdrehen. Nicht hineinpressen! Nicht überdrehen!

