

Kurzbeschreibung Chromalume Kopflicht

Diese Information ersetzt nicht das Lesen der Gebrauchsanweisung

Nach Einschalten der Lichtquelle dauert es ca. 10 Sekunden, bis das Licht volle Stärke erreicht hat. **Das Gerät in dieser Phase nicht aus/einschalten !**

Das Gerät arbeitet mit der zuletzt eingestellten Intensität (50-100 %). Diese lässt sich durch die Pfeiltasten (1) in Schritten von 5 % einstellen. Nach Hochfahren auf 100% kann mit der „Turbo“ Taste (2) die Intensität auf 120% gesetzt werden

Im Betrieb muss die Lichtquelle zur Belüftung frei stehen.

Das BFW Lichtleitkabel (blau) wird am Multiport in die grün markierte Buchse (BFW/ACMI) eingesteckt (3). Der Port muss sich in 3-Uhr-Position befinden. Das Kabel wird im Multiport in einem einen Sprengring gehalten, ist aber bei Bewegungen flexibel.

Die Stirnlampe wird am Kopfring getragen. Das blaue Lichtleitkabel ist 3m lang und leuchtet im Betrieb. **Achtung: den Lichtleiter nicht abknicken oder einklemmen!**

Die Neigung der Stirnlampe kann über ein Doppelgelenk (4) eingestellt werden. Das Leuchtfeld kann über eine Irisblende (5) eingestellt werden.

Der Kopfring wird durch zwei Stellknöpfe (6) eingestellt. Beide Stellknöpfe des Kopfringes soweit öffnen, dass der Kopfring locker auf dem Kopf des Nutzers aufliegt. Den oberen Kopf soweit anziehen, dass das vordere Teil des Kopfringes sich höhenmässig an der Stirn befindet. Den Sitz dann durch Anziehen des hinteren Stellknopfes fixieren.

Positionierung der Stirnlampe vor dem Waschvorgang: Iris auf Minimum einstellen und den Lichtspot in Operationshaltung leicht oberhalb der Hände positionieren. Dann Iris wieder aufmachen, Kabel ziehen und Gerät ausschalten. **Erst ausschalten, wenn die Lichtquelle volle Leuchtstärke erreicht hat!**

Kabel am Kittel oder Kasak des Operators mit der Kittelklemme (7) fixieren.

Achtung: Nach Betrieb ist das geräteseitige Ende des Lichtleiters heiß!
Zur Vermeidung von Verbrennungen nach dem OP dem Operateur die Stirnlampe abnehmen und mit aufgewickeltem und noch an der Lichtquelle eingestecktem Lichtleiter belassen.

