

## **Bedienung Dover**

bei Einsatz der Akkus in die Ladestation und in das Steuerteil auf die Position der Kontakte achten.

Bedienung des Steuerteils:

1 Knopf drücken : Gerät schaltet ein und ist auf der zuletzt eingestellten Stufe

1 Knopf erneut drücken. Intensitätsstufen (5) werden durchgeschaltet

2 Knöpfe (anhaltend) drücken (> 1 sec): Gerät schaltet ab.

Ladezustand des Akkus wird per LCD angezeigt wenn der Knopf neben der LCD zeile gedrückt wird (4 LEDs = volle Ladung), vollgeladen ca. 10 h Kapazität bei voller Leuchtstärke.

Bedienung des Kopfteiles

Einstellung Weite und Höhe über Drehknöpfe

Höhe des Leuchtmodules über den Steg und Stellknopf einstellen

das Leuchtmodul kann von Steg abgezogen werden und direkt an eine Lupenbrille aufgesteckt werden (passt für Surgitel, für Sugical Acuity und DVI mit Anschluss, liegt bei).

Handhabung des Akkus

Akku von hinten aus der Halterung drücken, wenn dieser wieder aufgeladen werden soll.

Nicht an der Lasche herausziehen!